

# Artelac® CL

## Návod k použití

Ke zvlhčování a osvěžování očí a k vlhčení a navlhčení tvrdých kontaktních čoček.

### Z čeho se skládají kapky Artelac® CL?

1 lahvička Artelac® CL obsahuje 10 ml roztoku.


1 ml roztoku obsahuje 3,2 mg hypromelosa a také pomocné látky; konzervační přísada je cetrimid.

### Kdy pomáhá Artelac® CL

Artelac® CL osvěžuje a uklidňuje oči. Zlepšuje zvlhčení povrchu oka při pocitu suchosti, pálení nebo únavě očí, způsobených např. dlouhým sledováním televize nebo monitoru počítače, pobytem ve vytápěných nebo klimatizovaných místnostech. Kapky Artelac® CL se také dobře hodí k navlhčení během nošení tvrdých kontaktních čoček.

### Jak se Artelac® CL používá?

Jednoduché a bezproblémové použití je znázorněno na obrázku. Dbejte prosím na to, abyste lahvičku při kapání drželi kolmo kapátkem dolů.

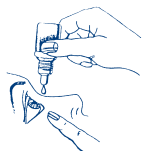

Nedotýkejte se prosím kapátkem kontaktní čočky, oka nebo prstů, aby nedošlo ke znečištění roztoku.

### Na co je třeba při použití Artelac® CL dbát?

Ve velice vzácných případech může dojít k reakcím přecitlivělosti. Přípravek se pak nesmí dále používat.

Jestliže používáte další oční přípravky, udržujte mezi jejich aplikací rozmezí asi 15 minut.

Nepoužívejte prosím roztok déle jak 6 týdnů po otevření lahvičky.

### Výrobce:

Dr. Gerhard Mann, Chem.-pharm. Fabrik GmbH  
Brunsbütteler Damm 165-173, D- 13581 Berlin

**Bausch & Lomb**

CE 0483

STERILE A

