

Přečtěte si, prosím a uchovejte, pečlivě tuto příbalovou informaci. Obsahuje důležité údaje, jak tento přípravek používat.

Boston® Simplus® Multi Action Solution

Speciálně vyvinut pro fluorosilikonakrylátové a silikonakrylátové tvrdé plynopropustné kontaktní čočky (RGP)

Popis a účel použití: Boston Simplus® Multi Action Solution je jedнокrokový roztok určený k čištění, dezinfekci a udržování tvrdých plynopropustných kontaktních čoček. Je schválen pro použití s fluorosilikonakrylátovými a silikonakrylátovými čočkami. Roztok odstraňuje z povrchu čoček proteiny, lipidy a omezuje tvoření těžko odstranitelných usazenin. Je vhodný k oplachování čoček a odstraňuje uvolněné částice usazenin z povrchu čoček. Vícepolymerový systém obsažený v roztoku má uklidňující vliv na oči a jiná patentovaná zvlhčující látka udržuje čočku vlhkou. Obsažené konzervační látky eliminují škodlivé mikroorganismy. Roztok je tedy účinný pro čištění i dezinfekci vašich čoček a zároveň zlepšuje schopnost snášet čočku na oku.

Složení: Sterilní vodný pufovaný roztok obsahuje poloxamin, hydroxy alkyl fosfonát, kyselinu boritou, boritan sodný, chlorid sodný, hydroxypropylmethyl celulózu a Glucam, a je konzervovaný chlorhexidin glukonátem (0,003%) a polyaminopropyl biguanidem (0,0005%).

Návod na použití:

Odstraňte bezpečnostní pásek z hrdla lahvičky. Pokud chybí nebo je poškozený roztok nepoužívejte.

Aby byl zajištěn správný účinek roztoku, dodržujte všechny popsání kroky.

- Důkladně si umyjte ruce mýdlem a osušte. (Pozor - tekutá mýdla mohou obsahovat složky na olejové bázi).
- Umístěte čočku do prázdného pouzdra a doplňte čerstvým roztokem Boston Simplus® Multi Action Solution. Ponechte čočku v roztoku nejméně 4 hodiny nebo přes noc před nošením.
- Po máčení, vyjměte čočku z pouzdra a jemně jí mněte s pár kapkami (2-4) roztoku Boston Simplus® Multi Action Solution v dlani po dobu 20 vteřin. (Není potřeba použít další čistič.)
- Oplachujte čočku 5 vteřin roztokem Boston Simplus® Multi Action Solution pro odstranění uvolněných usazenin a čočku vložte do oka. (Neoplachujte pod tekoucí vodou.)
- Opatrně vyčistěte pouzdro na čočky horkou vodou a nechte ho vyschnout.
Aby se předešlo kontaminaci roztoku vyhněte se kontaktu koncovky lahvičky s jinými předměty. Pokud lahvičku nepoužíváte udržujte jí pevně uzavřenou.

Upozornění:

- Nepoužívejte v případě alergie na kteroukoli složku přípravku.
- Nepoužívejte na měkké (hydrofilní) čočky.
- Postup péče o kontaktní čočky doporučený Vaším očním specialistou musí být dodržován. Opomenutí může způsobit oční infekci.
- Nedotýkejte se koncovkou lahvičky žádného povrchu ani oka, mohlo by dojít ke kontaminaci roztoku nebo poranění oka.
- Vždy si umyjte ruce před zacházením s čočkami.
- Nikdy nepoužívejte stejný roztok opakovaně, použijte čerstvý roztok pro čištění a dezinfekci čoček.
- Lahvičku uchovávejte vždy uzavřenou, aby se zabránilo odpařování a kontaminaci roztoku.
- Bez lékařského dohledu nepoužívejte žádné oční léky ve spojení s tímto roztokem.
- Vyhodte lahvičku se zbytkem roztoku po 3 měsících od prvního použití.
- Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Pouzdra na čočky mohou být zdrojem mikrobiální kontaminace a podráždění očí. Proto je potřeba je denně čistit a vyplachovat a ponechat vyschnout na vzduchu. Pouzdro je potřeba často obměňovat.

Důležité: V případě výskytu a přetrvání podráždění očí, nadměrného slzení nebo rozmazaného vidění, vyjměte čočky z oka a neodkladně se poradte se svým očním specialistou.




Bausch & Lomb Incorporated, 1400 North Goodman Street, Rochester, NY 14609, USA



Bausch & Lomb Incorporated Cork Road Industrial Estate, Waterford, X91 V383, Ireland

Vyrobena v Itálii

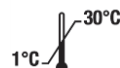

Distributor: Steplon s.r.o., Stružky 1326, 19800 Praha 9 – Kyje

Datum poslední revize: únor 2019

Bausch & Lomb, Boston a Boston Simplus jsou ochranné známky společnosti Bausch & Lomb Incorporated.